

číslo	:	POK_ODD_14
verze	:	01
exemplář	:	
strana	:	1 z 2
platí od	:	04.04.2016
přílohy	:	0
datum tisku	:	08.04.2016


Odběr stolice

Test na okultní krvácení FOB (odběrová zkumavka)


- Pro zjištění přítomnosti krve ve stolici se na našem pracovišti používá nový odběrový a diagnostický systém. Předejte zkumavku pacientovi a informujte ho o správné manipulaci s tímto odběrovým systémem
- Pro tento odběr není nutné žádné dietní opatření
- Neprovádět test při průjmu, krvácení z hemoroidů nebo při menstruaci
- Pokyny pro pacienty viz [Pokyny pro pacienty: Stolice na OK - FOB](#)

Postup:

1. Odběr vzorku stolice provádějte v čistém a suchém prostředí. Zkumavku držte při manipulaci ve svislé poloze **ZELENÝM UZÁVĚREM NAHORU!!!** Zabrání se tak vylití obsahu zkumavky.

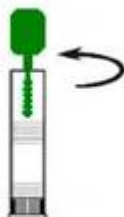

2. Otevřete **ZELENÝ UZÁVĚR** vybavený tenkým hrotem pro odběr stolice. Pomocí odběrového hrotu odeberete vzorek stolice ze **tří různých míst** tak, aby zbyla stolice ve drážkách hrotu. Odběrový hrot, v žádném případě neslouží pro odběr stolice přímo z konečníku!

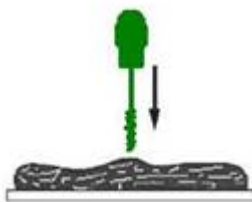

3. Odstraňte přebytečný vzorek stolice papírovým ubrouskem.



4. Zasuňte hrot s odebraným materiálem do zkumavky a pečlivě uzávěr utáhněte.

**Pokyny pro oddělení: Odběr stolice - OKB**

Pokyny/ Pokyny pro spolupracující oddělení

číslo	:	POK_ODD_14
verze	:	01
exemplář	:	
strana	:	2 z 2
platí od	:	04.04.2016
přílohy	:	0
datum tisku	:	08.04.2016



5. Zkumavku s odebraným materiálem uložte do igelitového sáčku a uchovejte v ledničce.
6. Po přijetí odběrové zkumavky od pacienta doručte prosím sáček se zkumavkou na Centrální příjem vzorků (G, 4. np.).