

**Pokyny pro oddělení: Odběr slin na DNA**

Pokyny/ Pokyny pro spolupracující oddělení

číslo	:	POK_ODD_17
verze	:	01
exemplář	:	
strana	:	1 z 1
platí od	:	05.05.2015
přílohy	:	0
datum tisku	:	12.06.2015

Pro izolaci DNA ze slin se používá speciální odběrová souprava k odběru slin.

Instrukce:

- Odběr slin proveďte před vyčištěním zubů.
- 30 minut před poskytnutím vzorku slin nejezte, nepijte, nekuřte a nežvýkejte žvýkačku
- Neodstraňujte plastovou fólii z víka nálevky.

Postup:

1. Vyplivněte malé množství slin do nálevky.
2. Jemně poklepejte na tubu, abyste přesunuli sliny na určené místo.
3. Zkontrolujte, že se vzorek slin nachází mezi 2 označenými řádky – tak jak je na obrázku příbalového letáku.
4. Pokuste se neplivat nad horní řádku na tubě.
5. Jednou rukou držte tubu ve vzpřímené poloze, zavřete víko a pevně tlačte prsty druhé ruky na víko, dokud neuslyšíte hlasité cvaknutí. Barevná kapalina ve víku se dostane do tuby, kde se promíchá se slinami.
6. Držte tubu ve svislé poloze a odšroubujte jí z nálevky.
7. Našroubujte malý uzávěr (součást setu) na tubu a tubu jím uzavřete.
8. Zatřepejte tubou (5 sekund).

Upozornění:

Při zasažení očí nebo kůže důkladně opláchněte vodou. Tekutina obsažená ve víčku se nesmí užívat vnitřně. Nálevku vyhodte nebo recyklujte.